

- Uitsluitend voor uitwendig gebruik -  
- Alleen gebruiken voor de behandeling van hand- en voetwratten en waterwratjes -



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Het product uitsluitend gebruiken zoals voorgeschreven. Het niet juist opvolgen van de gebruiksaanwijzing kan resulteren in huidbeschadiging zoals bevroeringsverschijnselen.



Niet gebruiken wanneer de verpakking of het spuitbusje beschadigd is.

## INHOUD HELTIQ WRATWEG




- 1 38 ml spuitbusje met kap; bevat Dimethylether (DME)
- 1 gebruiksaanwijzing
- 8 beschermpleisters
- 16 reinigingsdoekjes

## PRODUCTOMSCHRIJVING

HeltiQ Wratweg is een product voor het behandelen van hand- en voetwratten en waterwratjes (Mollescum Contagiosum) door middel van bevrozing (cryotherapie).

## HET HERKENNEN VAN HAND- EN VOETWRATTEN

Wratten zijn onschuldige verdikkingen van de huid veroorzaakt door het "human papilloma virus" (HPV). Wratten komen met name voor op de bovenkant van de handen, langs de nagels, op ellebogen en knieën.

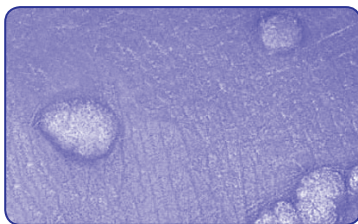

### Wratten zijn


- meestal hard en ruw en hebben een "bloemkoolachtig" oppervlak
- meestal niet pijnlijk

Voetwratten komen voor op de bal van de voet, op de onderkant van de hiel en tenen. Voetwratten hebben vaak een harde buitenrand en soms een zwart puntje in het midden. Door de druk van staan en lopen worden de wratten in de voetzool gedrukt waardoor voetwratten platter zijn.

### Voetwratten zijn

- meestal pijnlijk, met name wanneer ze voor komen op de bal van de voet of op de onderkant van de hiel
- rond en kunnen plat zijn door de druk van staan en lopen

## HET HERKENNEN VAN WATERWRATJES

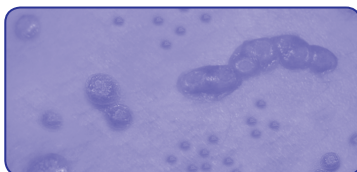

Waterwratjes zijn parelachtige, roze, ronde wratten die lijken op een hoed. Ze zijn erg besmettelijk en worden veroorzaakt door een pokkenvirus. Waterwratjes komen in groepen voor, meestal op de romp, armen en benen. De grootte van het waterwratje varieert van 1 mm tot 8 mm.

Bent u er niet zeker van of u met een wrat te maken heeft, raadpleeg dan uw arts.

## BEOOGD GEBRUIK

Het product is ontwikkeld om hand- en voetwratten en waterwratjes (Mollescum Contagiosum) te behandelen bij personen van 4 jaar en ouder. Het product is zonder recept verkrijgbaar.

## CONTRA-INDICATIES

HeltiQ Wratweg mag niet worden gebruikt:

- Als er sprake is of is geweest van een bevestigde diagnose van kanker en/of behandeling wordt ondergaan tegen kanker
- Ter behandeling van genitale wratten
- Op een donkere of licht gepigmenteerde huid
- Op moedervlekken, schoonheidsvlekken, donkere- al dan niet behaarde vlekken
- Wanneer de huid geïrriteerd of ontstoken is of bij eczeem
- In het gezicht
- Op een gevoelige huid zoals; nek, hals, billen of onder de oksels en borsten
- Op vreemd uitziende huidaandoeningen of wanneer niet duidelijk is of het om een wrat gaat
- Als er sprake is van gevoeligheid of allergie tegen extreme kou (urticaria)
- Bij personen met diabetes of stoornissen in de bloedsomloop o.a. ziekte van Raynaud
- Bij personen die immunosuppressiva slikken of bij personen met een auto-immuun ziekte
- Bij Hiv-geïnfecteerde personen
- Bij personen die antistollingsmiddelen slikken en hemofiliepatiënten
- Bij kinderen onder de 4 jaar
- In combinatie met andere wratbehandelingen

## WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

- Zeer licht ontvlambaar spuitbusje. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen
- Niet roken
- Uitsluitend voor uitwendig gebruik
- Ook na gebruik niet doorboren of verbranden
- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
- Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C
- Buiten het bereik van kinderen houden
- Spuitnevel niet inademen
- Vermijd contact met de ogen. Spray niet in of richting het oog, dit kan leiden tot bevroering en/of blindheid
- De wrat niet meer dan 4 keer behandelen met steeds 2 weken tussen de behandelingen
- Raadpleeg een arts wanneer de behandeling na 4 keer geen resultaat heeft gehad
- Het product kan huidbeschadiging zoals bevroeringsverschijnselen, littekenvorming of hypo-/hyperpigmentatie veroorzaken wanneer het niet volgens de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt
- Wanneer u het product wilt gebruiken tijdens de zwangerschap of in de periode dat u borstvoeding geeft, raadpleeg dan vooraf uw arts

- Uitsluitend voor uitwendig gebruik -  
- Alleen gebruiken voor de behandeling van hand- en voetwratten en waterwratjes -


## GEBRUIKSAANWIJZING HAND- EN VOETWRATTEN

Let op: de plastic kap niet van het spuitbusje verwijderen!

Grootte van de wrat	Aantal keren activeren van de spuitbus
Kleine wrat < 3mm	3x
Middelgrote wrat 3 mm to 5 mm	4x
Grote wrat > 6mm	5x



Positioneer de wrat naar boven zodat de opening van de kap over de wrat geplaatst kan worden. Plaats de opening van de kap zodanig dat de rand van de kap goed aansluit op de huid.

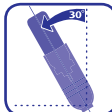


Voor de meest effectieve behandeling het spuitbusje zo verticaal mogelijk houden met een maximale afwijking van 30°.



Houd de kap goed vast en activeer het spuitbusje door deze met de duim **3 tot 5x** kort na elkaar stevig in te drukken (zie tabel)

Houd de kap vervolgens minimaal **10 seconden** op de wrat. Haal het spuitbusje van de wrat.

Er kan een 2 mm witte cirkel rondom de wrat ontstaan. Wanneer de huid droog is, kan er een klein litteken ontstaan. Dit verdwijnt in de komende dagen/ weken.

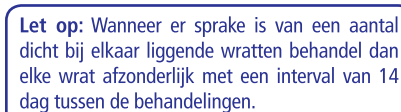

**Let op:** Wanneer er sprake is van een aantal dicht bij elkaar liggende wratten behandel dan elke wrat afzonderlijk met een interval van 14 dag tussen de behandelingen.

**Let op:** In de meeste gevallen is slechts één behandeling nodig. Bij hardnekkige wratten kunt u de behandeling herhalen na 10 seconden.

Wanneer de wrat na 14 dagen niet verdwenen is, kunt u de behandeling herhalen zoals voorgeschreven.

Tijdens of direct na de behandeling kan er een licht pijnlijk of prikkelend gevoel ontstaan dat geleidelijk weer verdwijnt.

Reinig de opening van de kap na gebruik met een reinigingsdoekje om besmetting of infectie te voorkomen.

Met name bij verhoogde en/of zeer gevoelige wratten kan één van de bijgeleverde pleisters extra bescherming bieden na de behandeling.


## GEBRUIKSAANWIJZING WATERWRATJES

Let op: De plastic kap niet van het spuitbusje verwijderen!

**Waarschuwing:** Behandel één waterwrat en wacht 24 uur zodat overgevoeligheid zichtbaar wordt. Behandel niet meer dan 2 waterwratten per dag. Behandeling wordt afgeraden voor kinderen met eczeem.



Positioneer de waterwrat naar boven zodat de opening van de kap over de waterwrat geplaatst kan worden. Plaats de opening van de kap zodanig dat de rand van de kap goed aansluit op de huid.

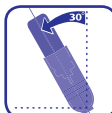


Voor de meest effectieve behandeling het spuitbusje zo verticaal mogelijk houden met een maximale afwijking van 30°.



Houd de kap goed vast en activeer het spuitbusje door deze met de duim **3x** kort na elkaar stevig in te drukken (zie afbeelding). Houd de kap vervolgens nog minimaal **5 seconden** op de waterwrat. Haal het spuitbusje van de waterwrat.

Er kan een 2 mm witte cirkel rondom de waterwrat ontstaan. Wanneer de huid droog is, kan er een klein litteken ontstaan. Dit verdwijnt in de komende dagen/ weken.

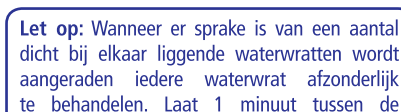

**Let op:** Wanneer er sprake is van een aantal dicht bij elkaar liggende waterwratten wordt aangeraden iedere waterwrat afzonderlijk te behandelen. Laat 1 minuut tussen de behandelingen om de plastic kap weer op kamertemperatuur te laten komen. Behandel niet meer dan 2 waterwratten per dag.

**Let op:** Wanneer er sprake is van een aantal dicht bij elkaar liggende waterwratten behandel dan elke waterwrat afzonderlijk met een interval van 1 dag tussen de behandelingen.

Wanneer de waterwrat na 14 dagen niet verdwenen is, kunt u de behandeling herhalen zoals voorgeschreven.

Tijdens of direct na de behandeling kan er een licht pijnlijk of prikkelend gevoel ontstaan dat geleidelijk weer verdwijnt!

Reinig de opening van de kap na gebruik met een reinigingsdoekje om besmetting of infectie te voorkomen.

Met name bij verhoogde en/of zeer gevoelige waterwratten kan één van de bijgeleverde pleisters extra bescherming bieden na de behandeling.

## NA DE BEHANDELING

- Er kan na de behandeling een blaar ontstaan; deze blaar niet doorprikken
- Niet aan de behandelde wrat komen of krabben
- Houd de behandelde wrat schoon om infectie te voorkomen
- Zwemmen, wassen, baden en douchen is toegestaan

## BEWAARADVIES

- Bewaren in een koele en droge ruimte op kamertemperatuur (maximaal 25 °C)
- De inhoud en de verpakking weggooiën volgens de plaatselijke voorschriften

## POTENTIËLE BIJWERKINGEN

- Cryotherapie kan hypopigmentatie (lichte plekken) of hyperpigmentatie (donkere plekken) veroorzaken. Deze zullen na verloop van tijd verdwijnen
- Bloeden
- Blaarvorming
- Littekenvorming naar aanleiding van het niet juist opvolgen van deze gebruiksaanwijzing
- Tijdelijk ongemak zoals pijn of een prikkelend gevoel
- Raadpleeg bij twijfel of bij het ontstaan van een ontsteking/complicatie uw arts

## KLACHTEN EN KLANTENSERVICE

Heeft u vragen en/of klachten over HeltiQ Wratweg, kijk dan op [www.wratweg.nl](http://www.wratweg.nl). Koninklijke Utermöhlen NV is tijdens kantooruren bereikbaar via +31 (0)561 69 33 66.

HeltiQ Wratweg is een medisch hulpmiddel.